

脳年齢計 ATMT 取扱い上の注意事項

本製品はタッチパネル PC を組込んでいる精密器材です。

液晶タッチパネルは非常にデリケートな器機ですので、下記の通り取扱いには十分配慮いただきますようお願いいたします。

<使用前の注意>

- 絶対に結露がない状態で使用してください。
(画面が室温に近くなると、結露は自然に消えます)
- 直射日光が当たる場所に設置して使用しないでください。
- 低温(5 未満)の環境で使用しないでください。
(低温環境で電源を入れて使用すると、液晶バックライトの寿命が低下する原因となります。)
- ぐらついた台や傾斜のあるところには置かないでください。
- 蛸足配線のコンセントに接続しないでください。
- USB コネクタは無理に挿したりしないでください。
- プリンタが印刷できない場合は、本体とプリンタの電源を OFF にしてください。
電源が OFF の状態で、USB コネクタを一度抜いて、きちんと挿し直してください。
その上で本体の電源を ON にし、脳年齢計が起動した状態でプリンタの電源を ON にしてください。
- 絶対に他の器機(PC・プリンタ等)を接続しないでください。
(プログラムが破損する可能性があります)
- 「各種設定モード」の右上の「×終了」は絶対に押さないでください。
(各種設定モードは音量等を変更する設定画面です。「×終了」を押すと、Windows モードが起動しますが、本機はカスタマイズされた OS<Windows XP Embedded>を使用しているため、プログラムが破損する可能性があります。くれぐれもご注意願います。)

<使用時の注意>

- 画面は指の腹で軽く触れるようにし、指先や爪で強く押さないでください。
- 画面をとがったものや硬いもので押さないでください。
- 画面をたたいたりしないでください。
- 画面を水拭きしないでください(柔らかい布等を使用してください)

<使用後の注意>

- 専用のケースには収納する向きがありますのでご注意ください。
- PC が内蔵されていますので、ご返送いただく際には、「精密器機につき取扱注意」としてご返送ください。
(専用ケースは本体を衝撃から保護する緩衝剤が入っておりますが、精密器機ですので過度の衝撃は故障の原因となります)